

## Vanové sedátko model 5014



### návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,

gratulujeme k nákupu vašeho nového vanového sedátka. Toto sedátko vám usnadňuje sezení ve vaší vaně bez nutnosti usednout na dno vany. Vhodné pro vany s vnitřním rozměrem mezi 520 a 620 mm



- Anti-bakteriální a hygienické sedadlo
- Rychlá a snadná instalace
- Povrch bez hran
- Neklouzavé připevnění z hliníkové trubky (19 a 22 mm v průměru, v uvedeném pořadí)
- Vhodné pro standardní vany s vnitřními rozměry mezi 520 ~ 620 mm
- Rozměry: 730 × 230 × 175 mm
- Rozměry sedadla: 410 × 230 mm
- Váha: 1,3 kg
- Maximální zatížení: 90 kg

## Bezpečnostní pokyny

- Vanové sedátko je určeno pro standardní vany s vnitřními rozměry od 520mm do 620mm a pouze pro soukromé použití. Není určeno pro komerční využití v nemocnicích, pečovatelských domech pro seniory, atd.
- Maximální zatížení sedačky je 90 kg.
- V žádném případě neupravujte vanové sedátko a nepřipevňujte k němu žádné další prvky.
- Nepoužívejte vanové sedátko jako žebřík. Nepoužívejte je na ostatním nábytku nebo vybavení.

## Údržba

Pravidelně kontrolujte stav vanového sedátka. Zkontrolujte zejména deformace a praskliny.

Zjistíte-li na vanovém sedátku jakékoliv vady, nesmí být používáno.

Pravidelně kontrolujte všechny spoje a utáhněte uvolněné šrouby.

## Čištění a údržba

- Otfete sedátko suchou hadrou po každém použití.
- Odstraňte všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně s malým množstvím mírného čistícího prostředku. Potom je otřete do sucha.
- Nepoužívejte drsných čistících prostředků, kyselin nebo zásad.
- V případě znečištění sedátka infekčními materiály použijte k jeho očištění standardní lihové dezinfekční roztoky.

## Pokyny k likvidaci


Nepotřebné nebo poškozené sedátko zlikvidujte ekologicky v tomu určeném zařízení (sběrný, ekodvory). Prosím řiďte se podle aktuálně platných předpisů!

## Umístění sedátka na vanu

### Varování

Vanová sedátka mohou být použita pouze na vany, kde je zaručena bezpečná a stabilní podpora. Před každým použitím zkontrolujte, že vanové sedátko pevně sedí všemi čtyřmi dosedacími plochami na okraji vany.

Umístění sedátka na okraji vany je znázorněno na obrázku.

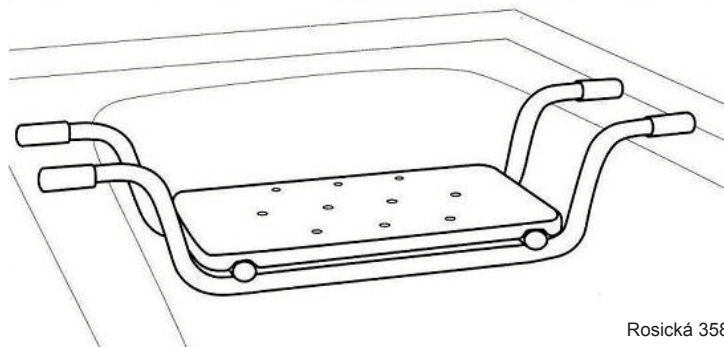

ARTTEC s.r.o.  
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice  
www.arttec.cz  
info@arttec.cz

Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494

Reklamační oddělení: tel.: +420 546 434 586,

fax: +420 546 212 004, mob: +420 731 542 965, reklamace@arttec.cz